

StériDERM HyalFill™ Pro

Дермальный филлер на основе сшитой гиалуроновой кислоты

Универсальное эстетическое решение

Обзор продукта

PHARMA-GRADE StériDERM HyalFill™ Pro — это биоразлагаемый дермальный филлер в форме геля сшитой гиалуроновой кислоты (ГК), изготовленный из ГК инъекционного класса (≥99 % чистоты) бактериальной ферментации. Корректирует поверхностные и глубокие морщины, увеличивает объем губ и контурирует черты лица.

- **ГК высокой чистоты:** Концентрация 25 мг/мл, сшитая для долговечности
- **Универсальное применение:** Мелкие морщины, глубокие морщины, увеличение губ
- **Биоразлагаемый:** Естественно рассасывается со временем
- **Легко вводится:** Гладкая консистенция для точного размещения
- **Длительный эффект:** До 6–12 месяцев

Технические характеристики

Характеристика	Спецификация
Концентрация ГК	25 мг/мл
Объем	1,0 мл на шприц
Сшивка	Сшитая BDDE
Источник	Бактериальная ферментация, ≥99 % чистоты
Срок хранения / Хранение	2 года / 2–25°C
Производство	Соответствует GMP EC, маркировка CE, ISO 13485

Рекомендации по применению

Для лицензированных специалистов с использованием асептических техник. Выбирать глубину инъекции и технику в зависимости от зоны (линейный threading, веерная или серийная пункция). Легко массировать после инъекции.

- Мелкие морщины: Поверхностная дерма, игла 30G
- Глубокие морщины: Средняя-глубокая дерма, игла 27G
- Увеличение губ: Подслизистый или глубокий дермальный слой, игла 27G–30G

Клинические преимущества

Преимущество	Показатель
Снижение морщин	80 % улучшение мелких морщин
Восстановление объема	90 % удовлетворенности для губ
Увлажнение	Способность связывать воду в 500 раз
Долговечность	Продолжительность 6–12 месяцев
Гладкость кожи	85 % улучшение текстуры

Противопоказания и качество

Не применять при активных инфекциях, аутоиммунных заболеваниях или гиперчувствительности к ГК. Только для профессионального использования.

- **Стерильность:** Стерилизован гамма-излучением, одноразового использования
- **Упаковка:** 1 × шприц 1,0 мл с 2 × иглами 27G/30G

Отказ от ответственности: Только для использования лицензированными эстетическими медицинскими специалистами. Не для самостоятельного лечения потребителями. Эффективность данного продукта не подтверждена исследованиями, одобренными Европейской комиссией или FDA США. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения, излечения или профилактики каких-либо заболеваний.